

深部打结

【目的】

1. 熟悉深部打结模具。
2. 通过模具掌握深部打结技巧。

【物品及器材】

深部打结模具、结扎线、血管钳。

【操作关键步骤】

1. 在一个带活动铁钩的模具上打一个方结，注意打结方向，保持铁钩不被拉起。
2. 在一个带有模拟血管的模具上做结扎血管操作，保证结扎后血流停止。

【注意事项】

1. 深部打结应减少对组织或血管的牵拉。
2. 深部打结牵引点、线结及下压手指应“三点成一线”。
3. 深部打结每次打结后，下牙左右手指应交替下压。